

# Auto-Max™



## Come si usa

1. Collegare Auto-Max sul manipo e posizionare lo stopper su Auto-Max



2. Auto-Max deve incontrare perpendicolarmente la superficie ossea. Premere il manipo per fissare il punto di taglio sull'osso e iniziare a perforare a circa 500 giri/m irrigando abbondantemente



3. Non usare fisiologica durante il prelievo per non disperdere i frammenti ossei raccolti

4. Auto-max si ferma automaticamente nell'osso ad una profondità di 4 mm

5. Disconnettere il dispositivo di stop e raccogliere su un vassoio sterile il particolato d'osso autologo

ripetere i passaggi 1-5 fino ad ottenere il volume d'osso desiderato

6. L'osso deve essere prelevato ogni volta da un nuovo sito evitando sovrapposizioni con siti già trattati

(e.g.)



## Prodotti



### Package



Ref. Code	Diameter(Ø)	Ref. Code	Diameter(Ø)
AM2535	11.5	AM5060	26.0
AM4050	15.0	AM6070	17.0

## Progettazione



## Inserimento facile e veloce

- 1) forza di taglio sufficiente, si ottiene già a bassi giri
- 2) Il volume di osso prelevato è l'equivalente della misura di Auto-Max!
- 3) permette il prelievo facile e veloce in un'unica procedura!
- 4) Si pulisce accuratamente perchè lo stopper è di facile disconnessione
- 5) L'apertura a V previene completamente la fuoriuscita delle chips d'osso durante il prelievo
- 6) Si utilizza in qualsiasi tipo d'osso con eccellente resistenza!





MEGAGEN Italia S.r.l.

Via Mazzini, 43/b - 22030 Pusiano CO

Tel. 031 656763 - Fax 031 655324

[info@megagenitalia.it](mailto:info@megagenitalia.it) - [www.megagenitalia.it](http://www.megagenitalia.it)